

Votre référence:

Autre référence:

Type de prélèvement	Contenant	Mode de conditionnement	Température d'acheminement	Délai d'acheminement	Modalités de transport
Frottis cervico-utérin	Flacon de solution PreservCyt® « ThinPrep pap test » Hologic 	Fixé	Température ambiante (15 à 25 °C)	Dès que possible Pendant les heures de réception du service de Pathologie (lundi au vendredi 8h-17h30) <i>dernier envoi des valisettes à 17h15</i>	<p>Envoi par Pneumatique (bouton Anapath) Valisettes (Code « 251 »)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>DOUBLE emballage : Pochette plastique NOIRE + BON de DEMANDE d'examen dans la pochette kangourou</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Envoi par Coursier ou transporteur</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>TRIPLE emballage : <i>(selon réglementation ADR en vigueur)</i> Pochette plastique NOIRE + BON de DEMANDE d'examen dans la pochette kangourou + 3^{ème} contenant hermétique (sac plastique ou autre...)</p>
Cytoponction nodule thyroïdien	Flacon Cytolyt® « ThinPrep » Hologic 				
Cytoponction organes pleins (ganglion, pancréas ...)	Flacon Formol tamponné à 4 % de 30 ml 				

<p>Urines Séreuses (liquide pleural, péritonéal, ascite) Cytoponction de kyste, abcès ... LBA LCR Liquide articulaire</p>	<p>Flacon type crachouillette</p> 				<p>Envoi par Pneumatique (bouton Anapath) Valisettes (Code « 251 »)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>DOUBLE emballage : Pochette plastique NOIRE + BON de DEMANDE d'examen dans la pochette kangourou</p>
<p>Aspiration bronchique</p>	<p>Flacon de 100 ml</p> 	<p>Etat FRAIS</p> <p><i>A conserver au frigo dans l'attente de l'envoi dans le service de Pathologie</i></p>	<p>Température ambiante (15 à 25 °C)</p>	<p>Dès que possible Pendant les heures de réception du service de Pathologie (lundi au vendredi 8h-17h30)</p>	<p>Envoi par Coursier ou transporteur</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>TRIPLE emballage : (selon réglementation ADR en vigueur) Pochette plastique NOIRE + BON de DEMANDE d'examen dans la pochette kangourou + 3^{ème} contenant hermétique (sac plastique ou autre...)</p>
<p>Brossage (œsophage, voies biliaires, bronchiques ...)</p>	<p>- Brossette plongée dans du sérum physiologique dans un flacon type crachouillette 30 ml</p>  <p>ou</p> <p>- Etalée sur lame, non fixée, séchée à l'air</p>	<p><i>Eviter les prélèvements le week end</i></p>		<p><i>dernier envoi des valisettes à 17h15</i></p>	

⚠ Les prélèvements (LCR ...) de patient suspect de **maladie de Creutzfeldt-Jakob** ne sont **pas acceptés dans le service de Pathologie** du CHU de Dijon (service non habilité pour la prise en charge de ces prélèvements). Ils doivent être adressés dans un centre habilité. <http://pitiasalpetriere.aphp.fr/creutzfeldt-jakob/liens-utiles-centre-de-referance-de-maladie-de-creutzfeldt-jacob/>